




Il miglior **tray** per lo sviluppo dei modelli con monconi sfilabili

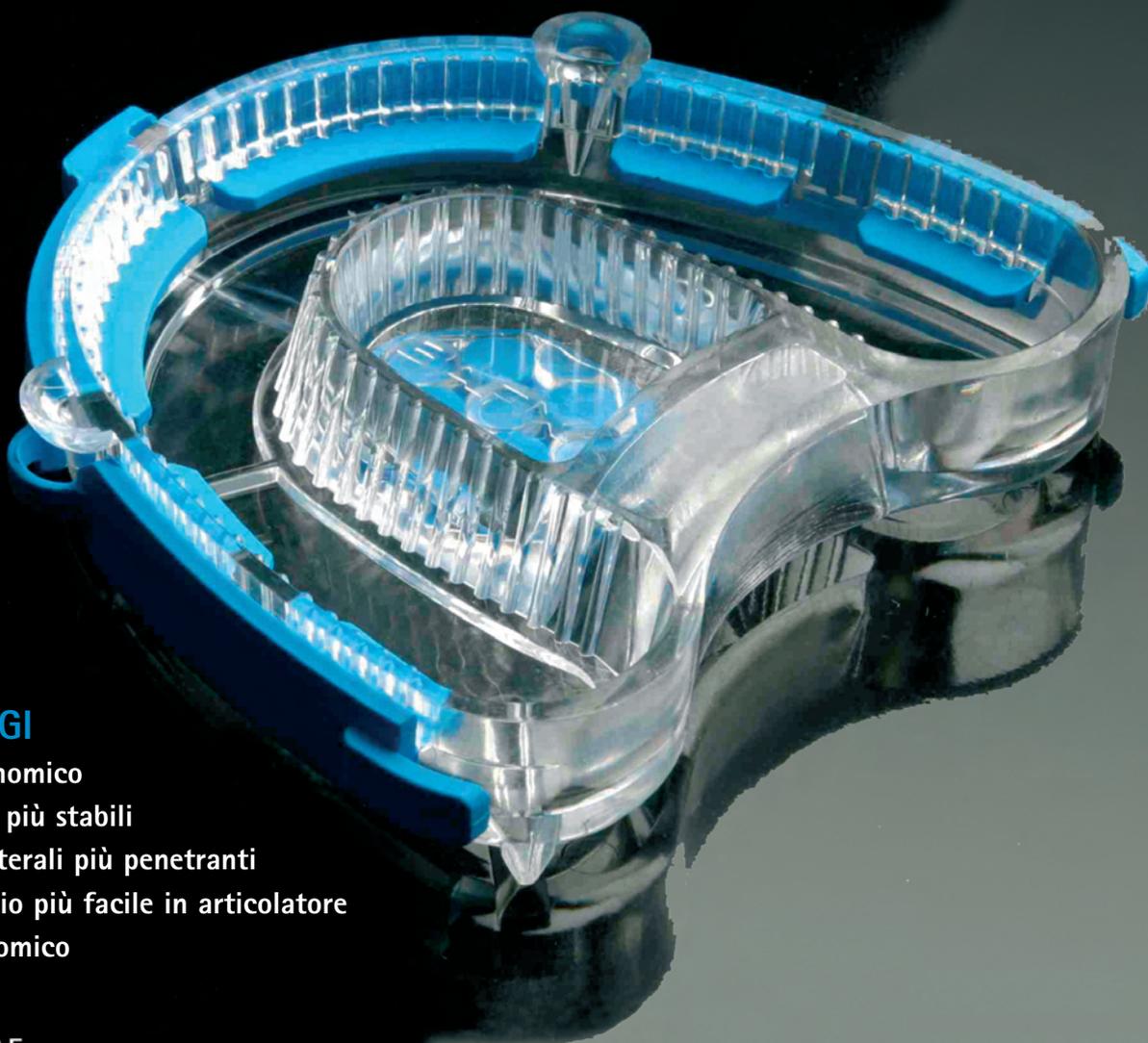

VANTAGGI

- ✓ Più ergonomico
- ✓ Monconi più stabili
- ✓ Alette laterali più penetranti
- ✓ Montaggio più facile in articolatore
- ✓ Più economico

Mod. Reg. C.E.
000157177-0001



Julián Camarillo, 7 - 3º C - 28037 MADRID - Teléfono: +34 913 049 305 - Fax: +34 913 043 924
e-mail: dtds@dtdsystems.com - web: www.dtdsystems.com

Facili Istruzioni per l'uso

...passo per passo

Rimuovere tutto il materiale in eccesso anche in altezza nell'area dell'impronta.



Posizionare il supporto BAFIX® sopra l'impronta in modo da controllare il perfetto allineamento dei monconi.



Segnare con un pennarello tra il supporto BAFIX® e l'impronta, la linea centrale della stessa più altri due punti laterali.



Per facilitare la rimozione del gesso, isolare con silicone spray (Gips Separator 400 ml.) e riempire contemporaneamente con un gesso di IV classe sia il supporto BAFIX® che l'impronta assicurandosi che entrambi i livelli siano a filo.



Posizionare il supporto BAFIX® sull'impronta, allineandolo ai punti di riferimento presi in precedenza.



Quando il gesso si è indurito, rimuovere l'impronta separandola dal supporto BAFIX®.



Con l'aiuto di un coltello da gesso, togliere le alette laterali di chiusura.



Per rimuovere il modello in gesso dal supporto BAFIX®, dare dei lievi colpetti con un martelletto



di Corno agendo sulle due alette laterali e il modello si estrarrà facilmente.